




RICHTER
MASSAGE TECHNIK

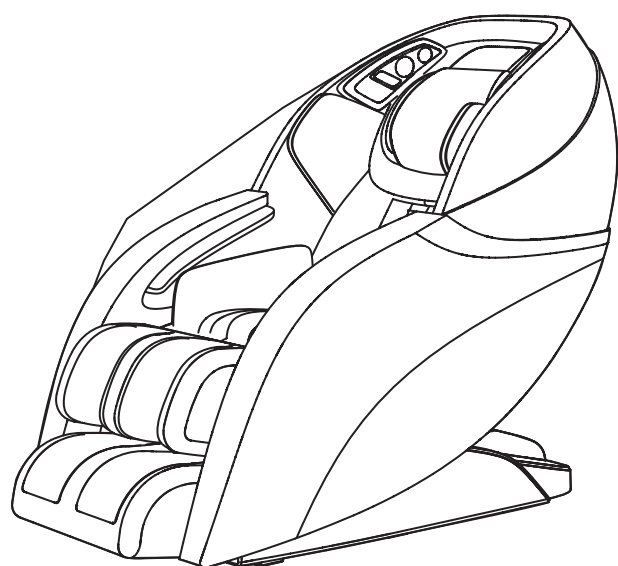

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

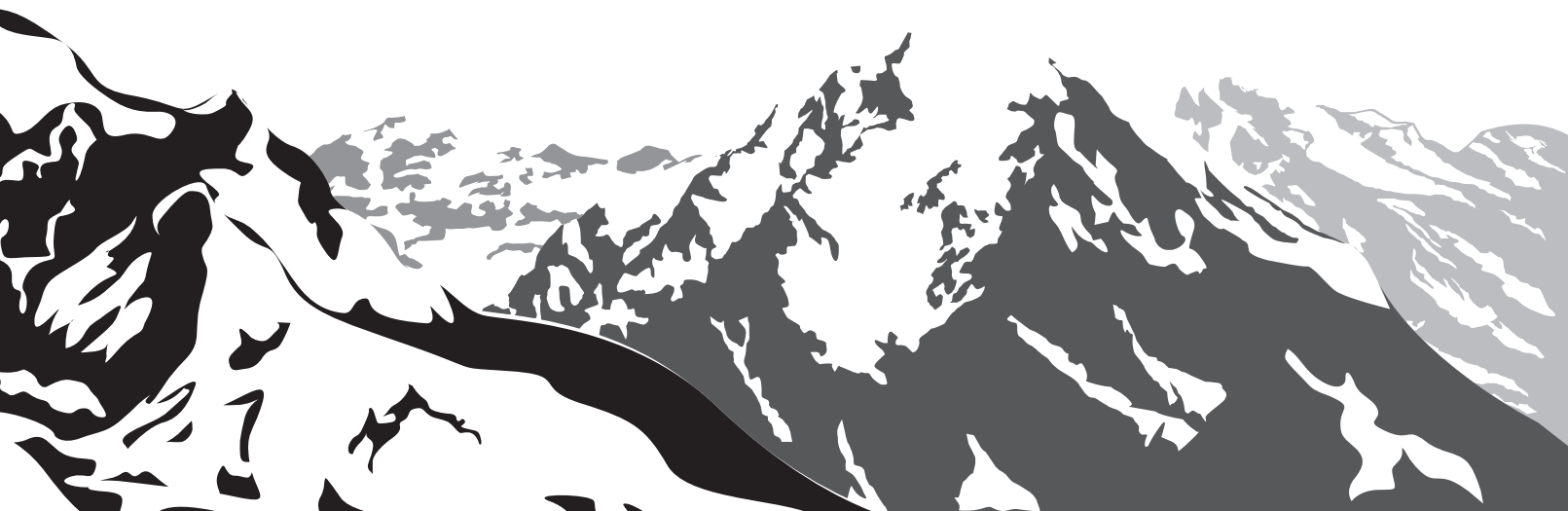

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- 1** 3D массаж. Массажный механизм повышенной надежности выполняет движения по трем осям: вверх-вниз, в стороны и надавливание. Ход роликов при надавливании до 8 см, это обеспечивает интенсивный массаж с глубокой проработкой мышц.
- 2** Удлиненная L-каретка анатомической формы. Длина каретки массажного механизма 120 см благодаря этому роликовый массаж охватывает поверхность тела от шеи до ягодиц.
- 3** Функция Нулевой гравитации. Кресло раскладывается таким образом, что обеспечивает максимальное расслабление мышц. Тело находится в положении сходном с положением космонавтов при старте космического корабля.
- 4** Массажное кресло Richter Alpine способно подстроится под пользователя любого роста. Благодаря особой конструкции, массажные подушки для плеч могут поворачиваться, а массажный блок для ног выдвигается на 16 см.
- 5** Благодаря 40 подушкам, расположенным в области рук, плеч, талии, бедер и ног, в кресле Richter Alpine осуществляется глубокий воздушно-компрессионный массаж, который улучшает циркуляцию крови в целом, а так же эффективно снимает усталость ног.
- 6** Слайдер-система раскладки кресла. Кресло выезжает вперед на 28 см. при раскладывании, Это позволяет поставить массажное кресло практически вплотную к стене.
- 7** Управление со смартфона. Скачайте с сайта richter-massage.ru приложение для телефонов под управлением ОС Android и управляйте креслом со своего телефона.
- 8** Слушайте свою любимую музыку во время массажа. Используя bluetooth соединение вы можете подключить свой телефон к стерео динамикам и прослушивать любимую музыку со своего телефона.
- 9** 6 массажных роликов для стоп помогут вам снять напряжение. Массажные ролики для стоп, по три с каждой для каждой ноги, расположены, так что бы охватывать всю подошву стопы.
- 10** Инфракрасный прогрев в районе поясницы расслабит мышцы, обеспечит дополнительный приток крови и позволит улучшить качество массажа.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ МАССАЖНОГО КРЕСЛА ALPINE

- 1 Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- 2 Держите руководство под рукой для возможных консультаций.
- 3 Четко соблюдайте МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ЗАМЕТКА

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию изделия. Это может быть сделано без предварительных уведомлений. Все рисунки, представленные в руководстве, подготовлены для презентации изделия и несут справочную информацию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Название модели | Alpine |
| Номинальное напряжение | 220В-240В |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальное энергопотребление | 180 Ватт |
| Таймер | 10, 20, 30 мин |
| Максимальное время работы | 30 мин |
| Габариты (Д x В x Ш) | Горизонтально 188 x 88 x 82 см Вертикально 168 x 88 x 126 см |
| Упаковка, три коробки (Д x В x Ш) | 170 x 85 x 86 см 154,5 x 43 x 66 см 63,5 x 49,5 x 59 см |
| Вес нетто/брутто | 138/173,5 кг |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10°-40° Относительная влажность: 30-85 RH |
| Условия хранения | Температура хранения: 20°-60° (безопасно) Влажность хранения: 30-85 RH |



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|----|
| Меры безопасности | 06 |
| Внешнее устройство | 10 |
| Сборка кресла | 11 |
| Пульт управления | 16 |
| I. Автоматические программы | 18 |
| II. Ручное управление | 19 |
| III. Настройки кресла | 23 |
| Устранение неисправностей | 24 |
| Уход и хранение | 25 |
| Гарантийный талон | 26 |




Сохраните настоящую инструкцию на все время использования кресла.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Внимательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, что установка и эксплуатация массажного кресла правильные.
- ✓ «Указания по технике безопасности» обеспечивают предупреждения и предостережения при наличии важной информации, касающейся безопасности.
- ✓ Все пункты «Внимание» и «Осторожно» это важные предостережения по безопасности, пожалуйста, уделяйте им больше внимания.

| | |
|--|--|
|  ОСТОРОЖНО | Это знак указывает на возможность получения травм. |
|  ВНИМАНИЕ | Это знак указывает на возможность причинения боли или повреждение вещей. |

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Это знак указывает на запрещенное поведение. |  | Это знак указывает, что самостоятельная разборка кресла запрещена. |
|  | Это знак указывает на необходимость следовать инструкциям при работе кресла. |  | Это знак указывает на правильное обращение с кабелем. |

- ✓ Придерживайтесь правил описанных далее при использовании кресла.






МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ








ОСТОРОЖНО

| | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Запрещается пользоваться людям, страдающим остеопорозом. • Людям с заболеваниями сердца, с вживленным кардиостимулятором и другими устройствами. • Кресло не рекомендуется использовать беременным женщинам, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. • Не допускается использование кресла при высокой температурой. • Запрещается пользоваться людям с нарушением восприятия. • Запрещается использовать кресло людям старше 80 лет. • Не допускается использование кресла детьми, а так же людьми в состоянии алкогольного опьянения. • Запрещается спать в массажном кресле. • Не используйте кресло, если ваше тело влажное. | <p>Случаи, когда использование кресла не рекомендуется или нужна консультация у врача</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что рядом с креслом (под ним, над ним, перед ним) нет детей и домашних животных. • Если во время массажа вы чувствуете недомогание, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с врачом. • Не производите слишком интенсивный массаж головы. • Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи. • Не допускайте детей и домашних животных к креслу, особенно, когда оно работает. Не разрешается сидеть на спинке и подлокотниках кресла. • Не допускается использование кресла людьми с нарушениями интеллекта, психическими расстройствами, ограниченными физическими возможностями, без присмотра. | <p>Вероятность получения травм/повреждений</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Подключите шнур питания в розетку с подходящими параметрами. Убедитесь, что вилка вставлена до конца, во избежание короткого замыкания или возникновения пожара. • Если кресло не используется, вытащите шнур питания из розетки, перед этим остановите программы массажа и выключите питание. | <p>Возможность возникновения пожара или удара током</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Не допускается использование кресла, если перекрыты вентиляционные отверстия. • Нельзя сгибать и деформировать массажные ролики. • Запрещено держать кресло работающим вхолостую в течение длительного времени. | <p>Вероятность несчастного случая</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Запрещено пользоваться неисправным шнуром питания, вилкой, или розеткой. • Используйте только подходящий источник питания. • Запрещается использовать поврежденный, перекрученный или сдавленный провод. | <p>Возможность возникновения пожара или удара током</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Если в работе кресла наблюдаются неисправности, если обнаружена поломка, если кресло попало под воду, воспользуйтесь услугами мастера из сервисного центра Вашего дилера. Самостоятельный разбор, попытки ремонта или вмешательство в устройство кресла запрещаются. • Если провод или вилка повреждены, обратитесь к дилеру. • Не пытайтесь разобрать кресло самостоятельно, возможен удар током или травма. • Перед использованием осмотрите материал обивки, нет ли повреждений. Если нашли, перестаньте пользоваться креслом и обратитесь к дилеру. | <p>Разборка кресла и ремонт</p> |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


|  ВНИМАНИЕ | | |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности. | Во избежание падения |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Располагайте кресло на расстоянии 10 сантиметров от стены, чтобы обеспечить свободное место для наклона спинки при раскладке кресла. | Для обеспечения возможности лечь прямо в кресле |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Максимально допустимое время работы – 30 минут, 5 минут отводится для каждой позиции, начинающейся с легкого массажа. Длительный массаж в одном положении может вызвать дискомфорт. | Слишком долгий массаж может негативно сказаться на вашем самочувствии |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Чтобы не вызывать возникновения дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды | Во избежания ухудшения самочувствия |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Пульт управления следует держать на специальной подставке во избежание его возможной поломки и случайной активации. | Во избежание травм |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ.», перед тем, как вставить вилку в розетку. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Выключите питание перед тем, как вытащить вилку. | Во избежание несчастных случаев при включении питания |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что вилка вставлена полностью. | Во избежание возникновения пожара или короткого замыкания |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что шнур питания не влажный и не поврежден. | Во избежание удара током или поломки |
| <ul style="list-style-type: none"> • Устанавливайте заземление. • Вилку можно вставлять только в заземленную розетку.  | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Не сдавливайте руками и не наступайте на массажные ролики. • Избегайте попадания конечностей между роликами во время работы кресла. • Избегайте попадания рук или ног в пространство между механическими частями кресла. • Не вставляйте и не роняйте ничего в щели между спинкой, сиденьем и подлокотниками в массажном кресле. • Запрещается сидеть, вставать, а также класть вещи на спинку, подлокотники, подставку для ног. • Запрещается вставать на кресло во время массажа. • Не перемещайте работающее кресло. • Не выключайте питание и не вытаскивайте шнур питания из сети во время массажа. • Избегайте попадания различных частей тела в пространство между подставкой и креслом. • Перед использованием кресла снимите украшения для волос, браслеты, часы и другие предметы, которые могут нанести травму во время массажа. • В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов при массаже ягодиц и бедер. • Не садитесь и не надавливайте на спинку кресла, если та откинута. • Производите массаж через тонкую ткань, поскольку таким образом достигается лучший эффект от массажа. Однако, возможно раздражение кожи и кри-о-ожоги. | Во избежание травм и поломки |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Храните кресло вдали от нагревательных предметов, мокрых, острых и вызывающих коррозию предметов, а также от взрывчатых и горючих веществ. • Запрещается использование чехлов с электрообогревом и других предметов с обогревом. • Не храните кресло в сильно запыленных местах, а также в местах со скоплением коррозирующих газов. • Не храните кресло в слишком тесных помещениях, и не используйте его в плохо проветриваемых местах. | Во избежание обесцвечивания обивки или ухудшения работы пульта ДУ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Храните кресло вдали от кухонной плиты и других источников тепла. • Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Используйте кресло только в помещении. | |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


|  ВНИМАНИЕ | | |
|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Не используйте и не храните кресло в помещениях с высокой влажностью (бассейн, ванная и пр.). • Кресло и пульт управления всегда должны оставаться сухими. | Во избежание утечки или поражению электрическим током |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что заземление проведено надлежащим образом. (В противном случае возможен риск поражения током. Если вы не можете самостоятельно провести заземление, воспользуйтесь услугами профессионального электрика). • Не используйте переходник (если вилка в комплекте поставки не совпадает с разъемом розетки, не пытайтесь самостоятельно переоборудовать ее, и воспользуйтесь услугами электрика для установки подходящего разъема). | Во избежание поражения электрическим током. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Выключите питание и вытащите шнур из розетки перед чисткой кресла. • Выключите питание и вытащите шнур из розетки после использования кресла. | Во избежание поражения электрическим током или пожара. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Выключите питание и вытащите шнур из розетки в случае перебоев в сети напряжения. • Вытаскивайте шнур питания держа за вилку, не тяните за провод. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • По завершении массажа выключите питания и вытащите шнур из розетки. | Во избежание несчастных случаев. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • В случае отключения электроэнергии немедленно вытащите шнур из розетки. | Во избежание повреждений или несчастных случаев при повторном включении питания. |
|  | <p>ОСТОРОЖНО!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не используйте кресло, если на него попала влага. 2. Запрещается использование кресла детьми или людям с ограниченными возможностями. 3. Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу. | |

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО

КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА

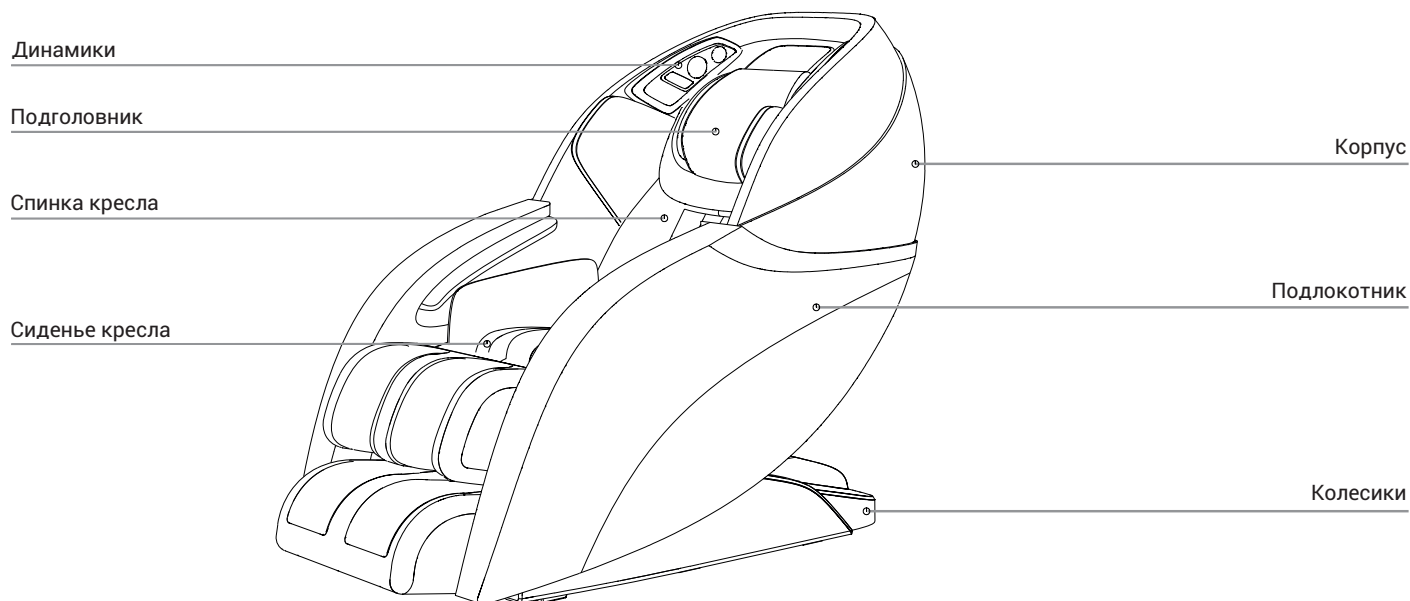

ПОЛОЖЕНИЕ МАССАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

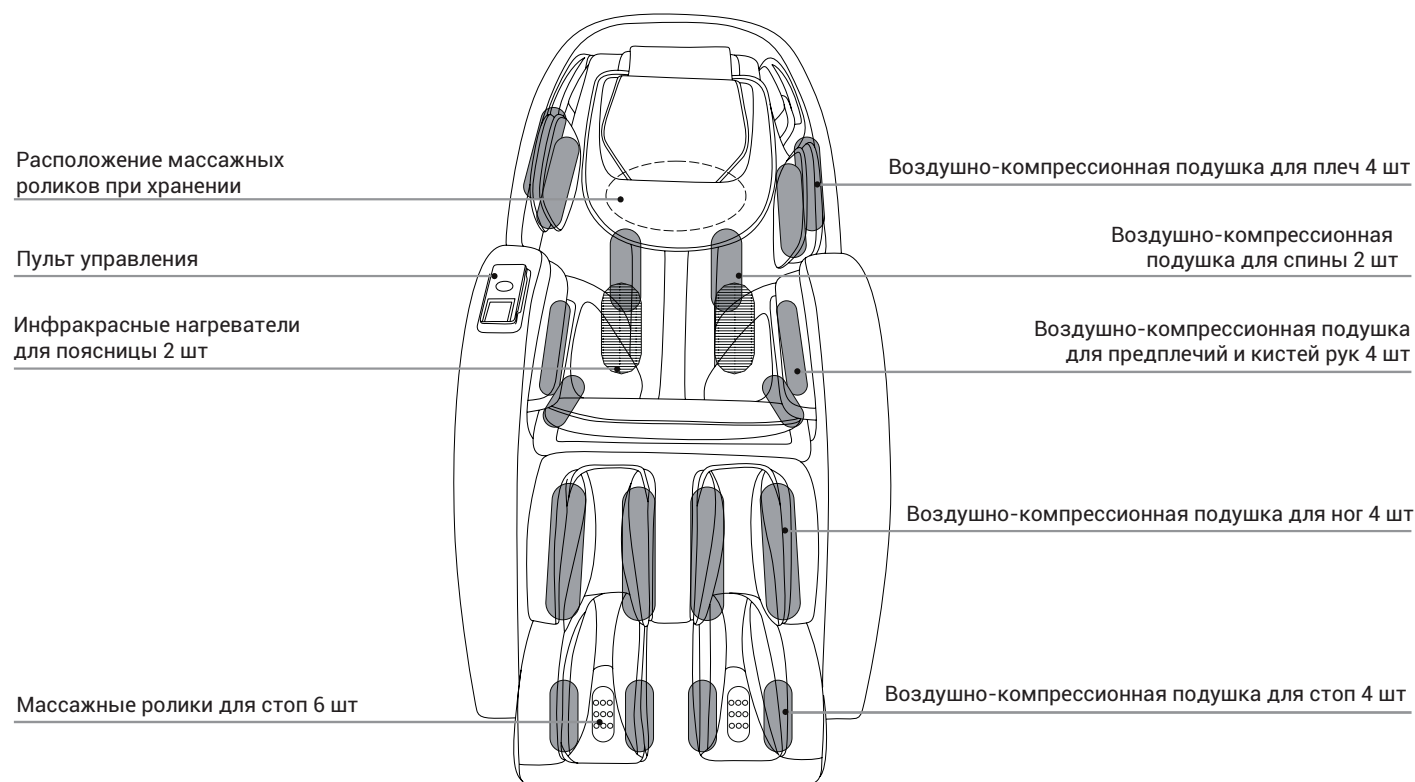


СБОРКА КРЕСЛА

УСТАНОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ

- Достаньте корпус массажного кресла, подголовники, подголовник, провод и остальные аксессуары. Для переноски корпуса вам потребуются от трех человек. Переносить следует медленно и осторожно.
- Подлокотники держите с двух сторон, и аккуратно вытащите их из коробки. положите на стол или пол (делайте это аккуратно, чтобы не повредить их).
- Подключите воздушную трубку сиденья к воздухозаборнику подлокотника.
- Повесьте крючок подлокотника на шатун сиденья, сбоку со стороны каркаса сиденья подключите подлокотник.
- Затем надавите на подлокотник до полной посадки и фиксации.
- Закрепите подлокотник к каркасу сиденья с помощью винта.
- Установите второй подлокотник, следуя описанной выше схеме


Не сдавливайте трубку и шнур питания во время установки.

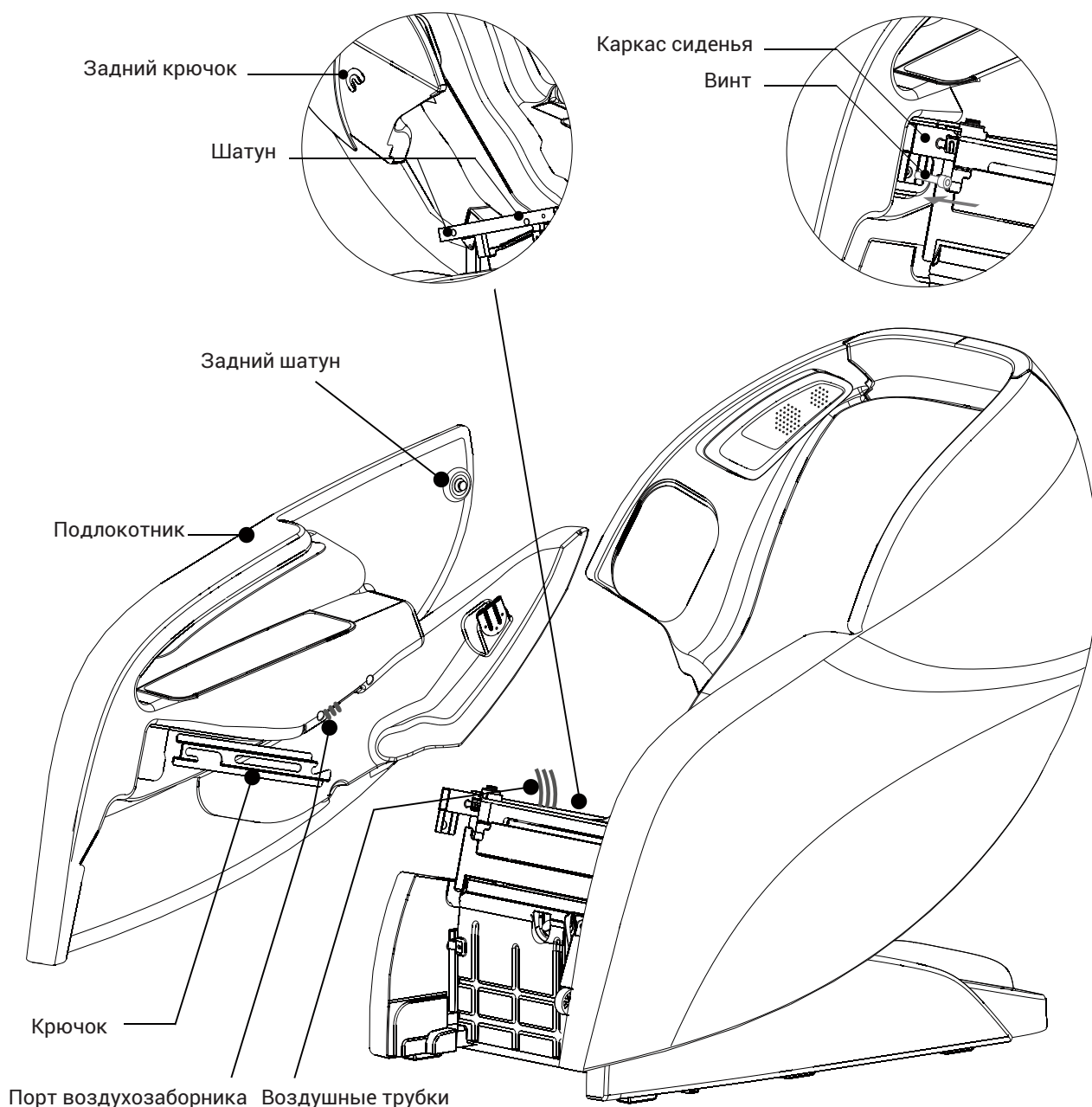


СБОРКА КРЕСЛА

УСТАНОВКА БЛОКА ДЛЯ НОГ

- Наденьте крючки секции для ног на соединительные валы расположенные с внутренней стороны, на каркасе сидения массажного кресла (обратите внимание на равновесие секции для ног при закреплении).

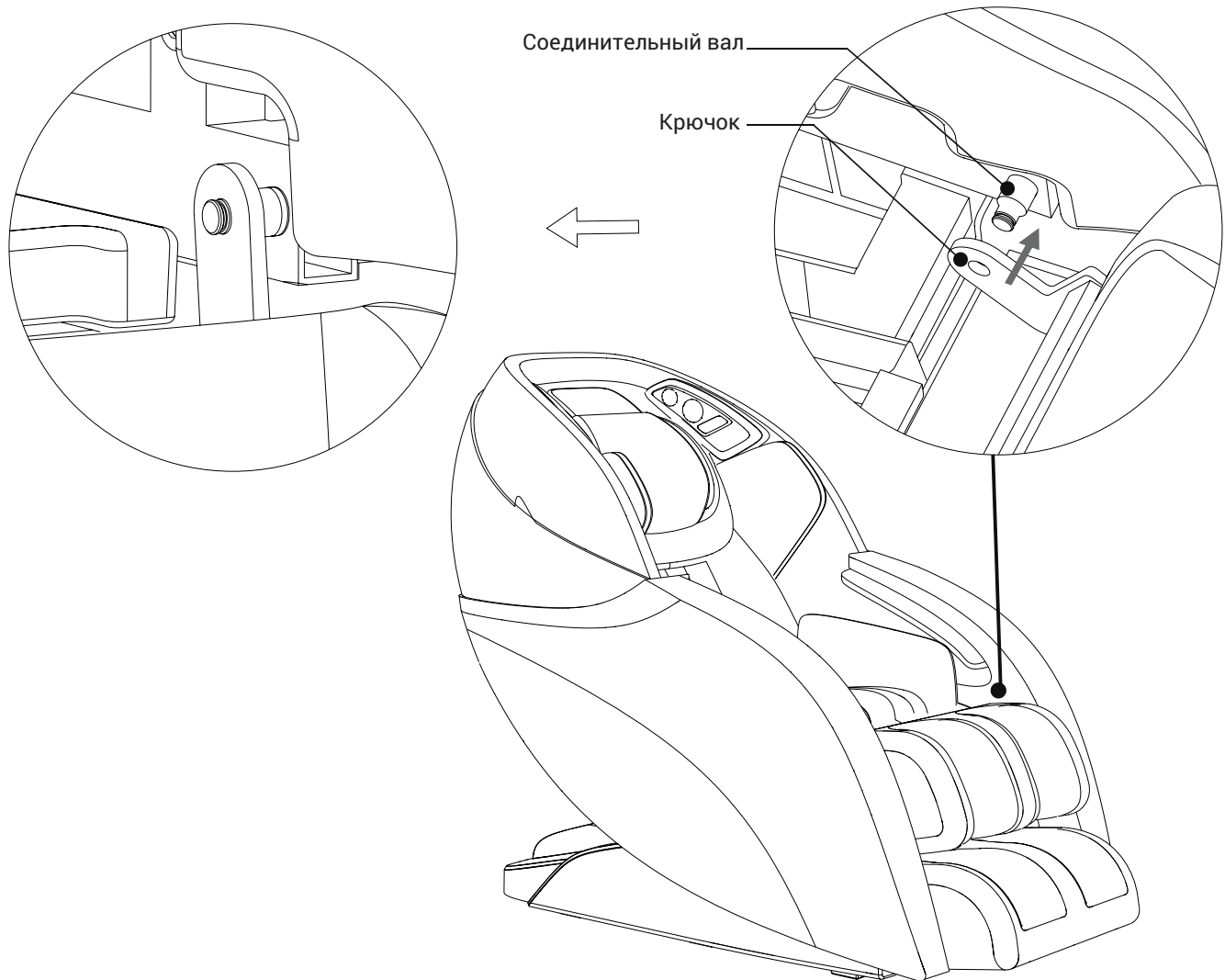


- Поднимите блок для ног, подключите воздухозаборник и воздуховод в отверстия на основании сиденья и убедитесь, что они надежно закреплены.

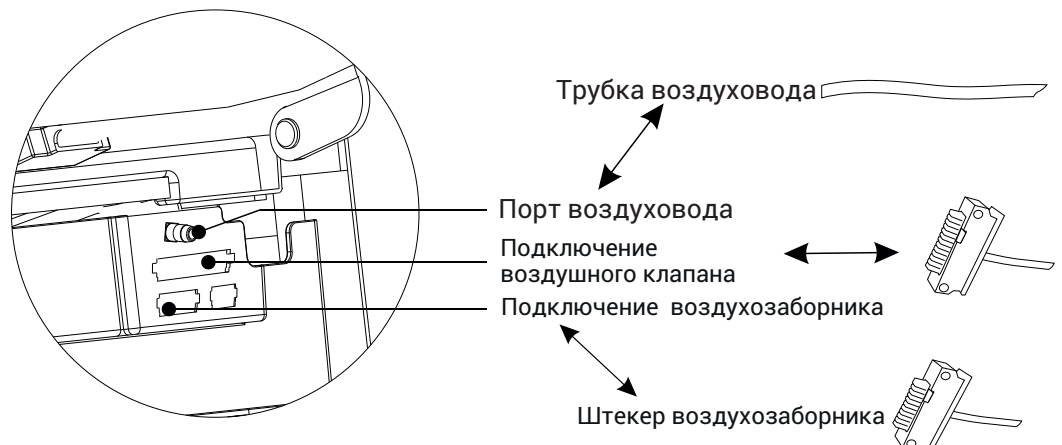


СБОРКА КРЕСЛА

ВКЛЮЧЕНИЕ КРЕСЛА, ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- Подключите шнур пульта к разъему на внутренней стороне правого подлокотника. При подключении обратите внимание ключ совпадения контактов (выпуклый и вогнутый рельеф на штекере и порте подключения пульта управления).

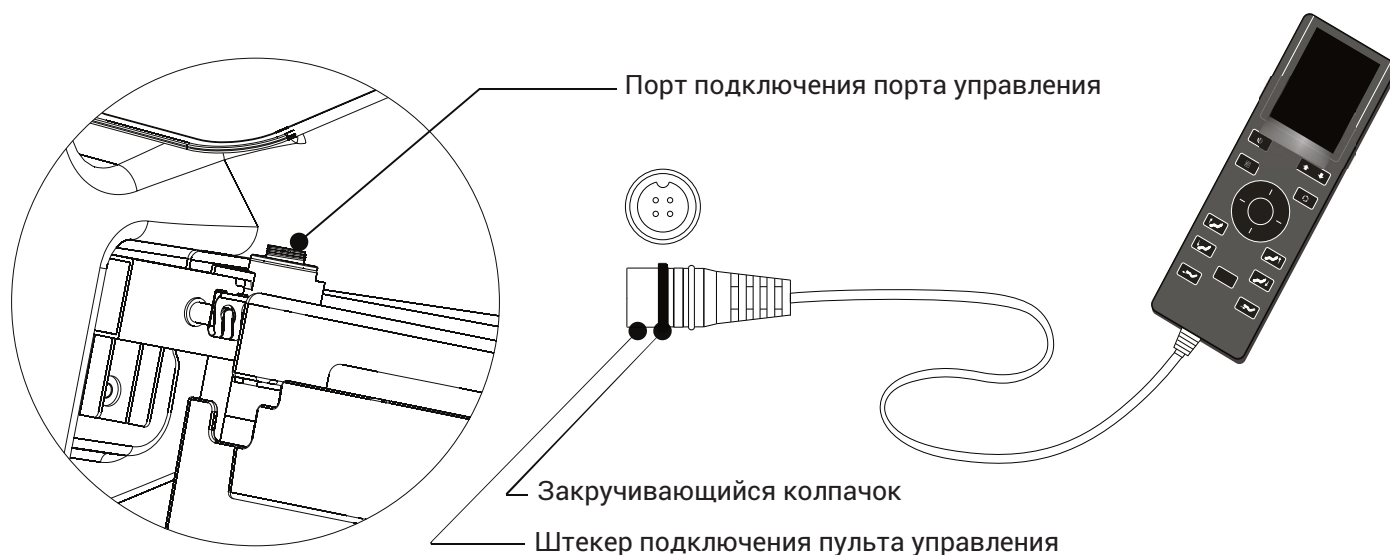


- Подключите шнур питания к разъему на опоре корпуса массажного кресла. Включите вилку шнура питания в сеть.
- Включите массажное кресло. Переключатель Вкл/Выкл находится на опоре массажного кресла с правой сторон под подлокотником.
- Используйте пульт управления, поднимите спинку массажного кресла вертикальное положение.

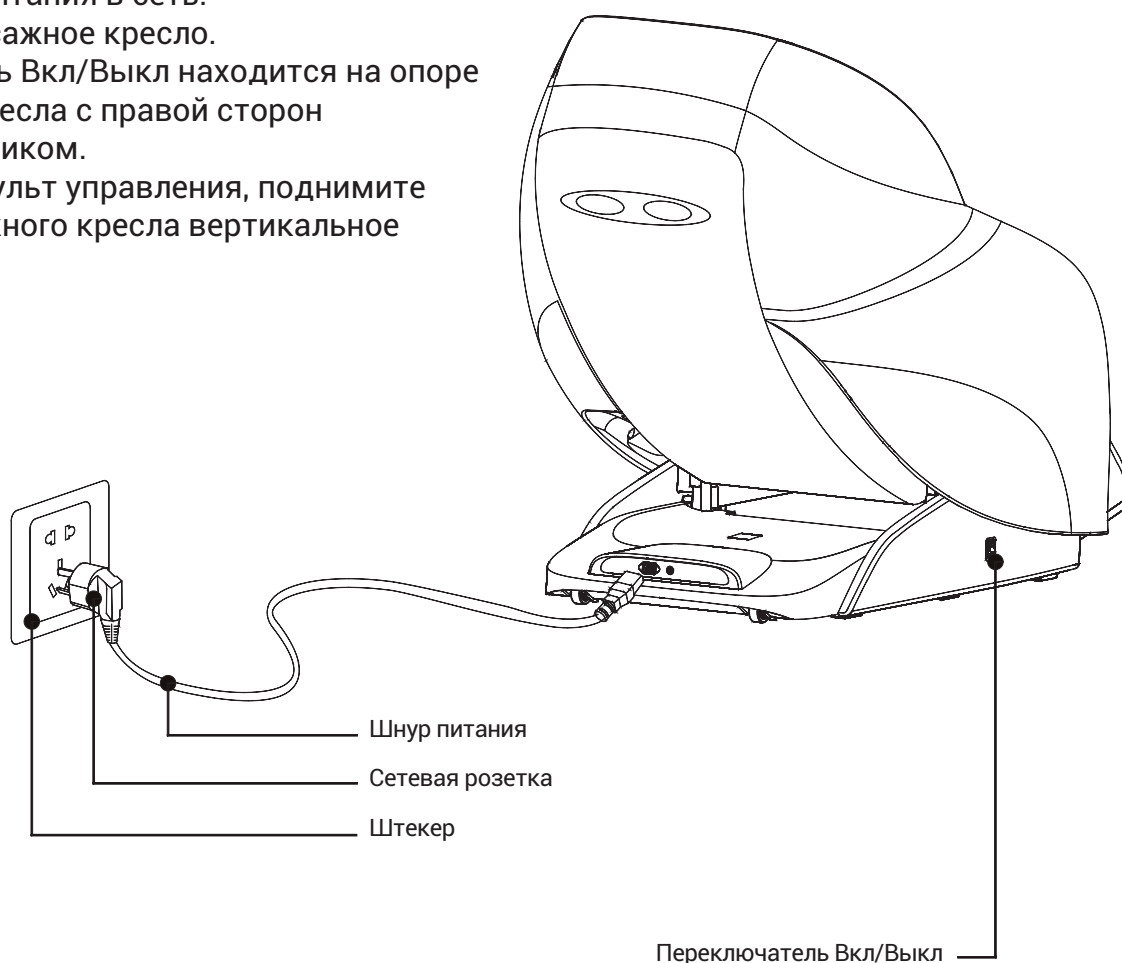

СБОРКА КРЕСЛА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

- Убедитесь, что движению колесиков ничто не мешает. Не передвигайте кресло по грубой поверхности или по деревянному полу, а также в узком месте. В таких случаях нужно, переносили 2 человека.
- Убедитесь, что провода находятся над уровнем пола, наклоните спинку (так, чтобы вес кресла приходился на колеса), толкните кресло вперед до места установки и осторожно придайте креслу ровное положение.

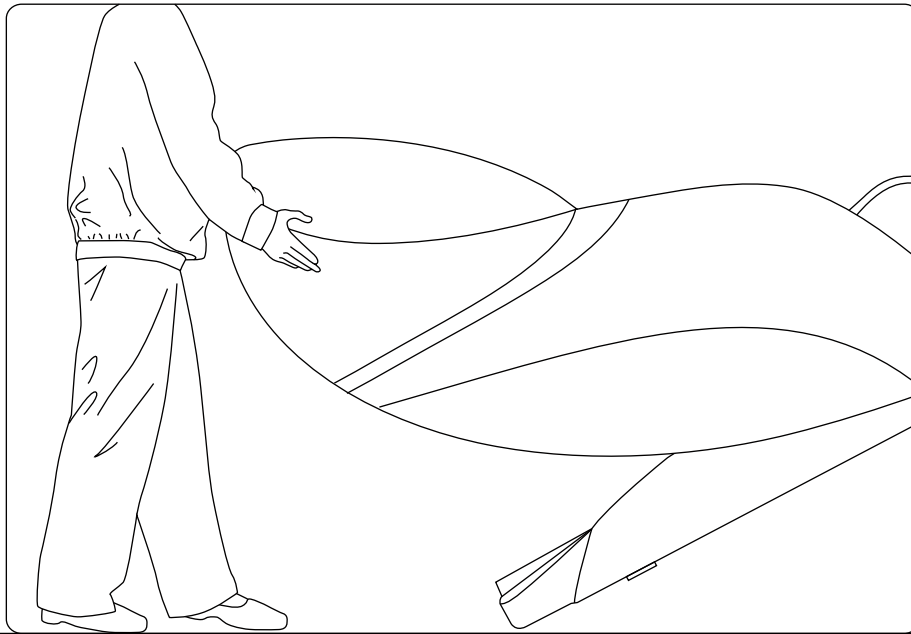


Внимание:

- **Не передвигайте массажное кресло с подключенным шнуром электропитания.**
Не передвигайте кресло вместе с сидящим там человеком.
- **При перемещении не используйте подлокотники для перемещения кресла. Используйте специальные держатели расположенные спереди и сзади.**


СБОРКА КРЕСЛА

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно. Вокруг массажного кресла должно быть достаточно места. Оставьте позади спинки кресла 10 см пустого пространства и 60 см спереди от кресла

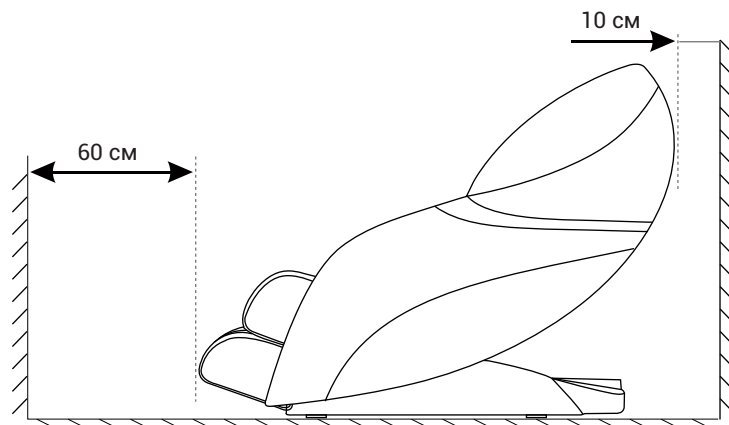

- Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, устанавливайте массажное кресло в отдалении от телевизора, радиоприёмника и прочей аудио и видео аппаратуры.
- Чтобы массажное кресло не оставляло следов на полу можно его установить на защитное покрытие/ковёр. Перед установкой, проверьте, что бы на защитном покрытии/ковре

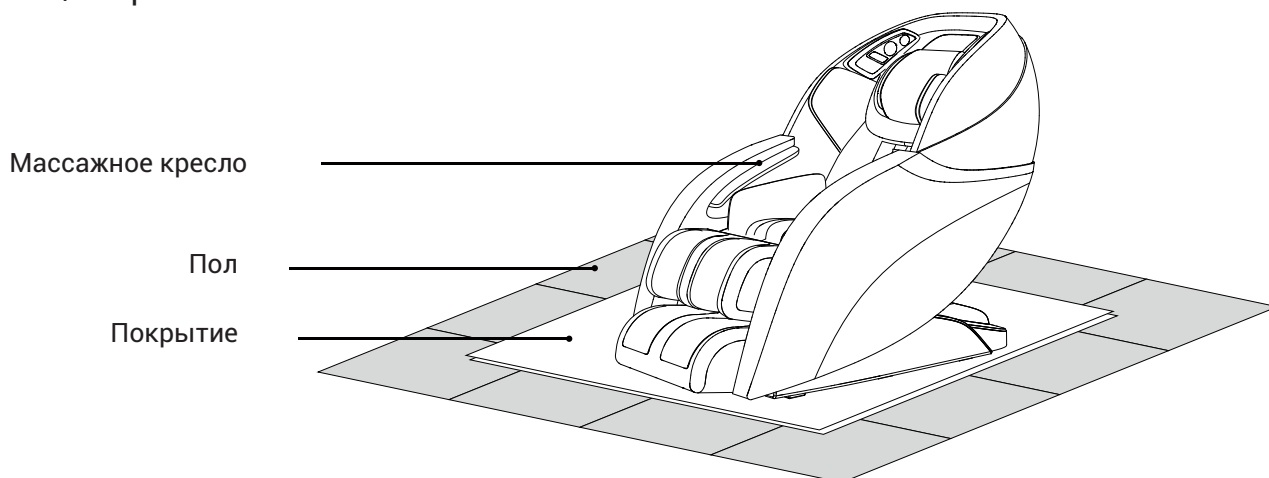


- Устанавливайте массажное кресло вдали от влажных мест. Не устанавливайте кресло в ванной комнате.



- Устанавливайте массажное кресло вдали от источников высокой температуры (например печь) . Перегревание массажного кресла может привести к поломке или возникновению возгорания.

Подключайте массажное кресло только в розетку с заземлением

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

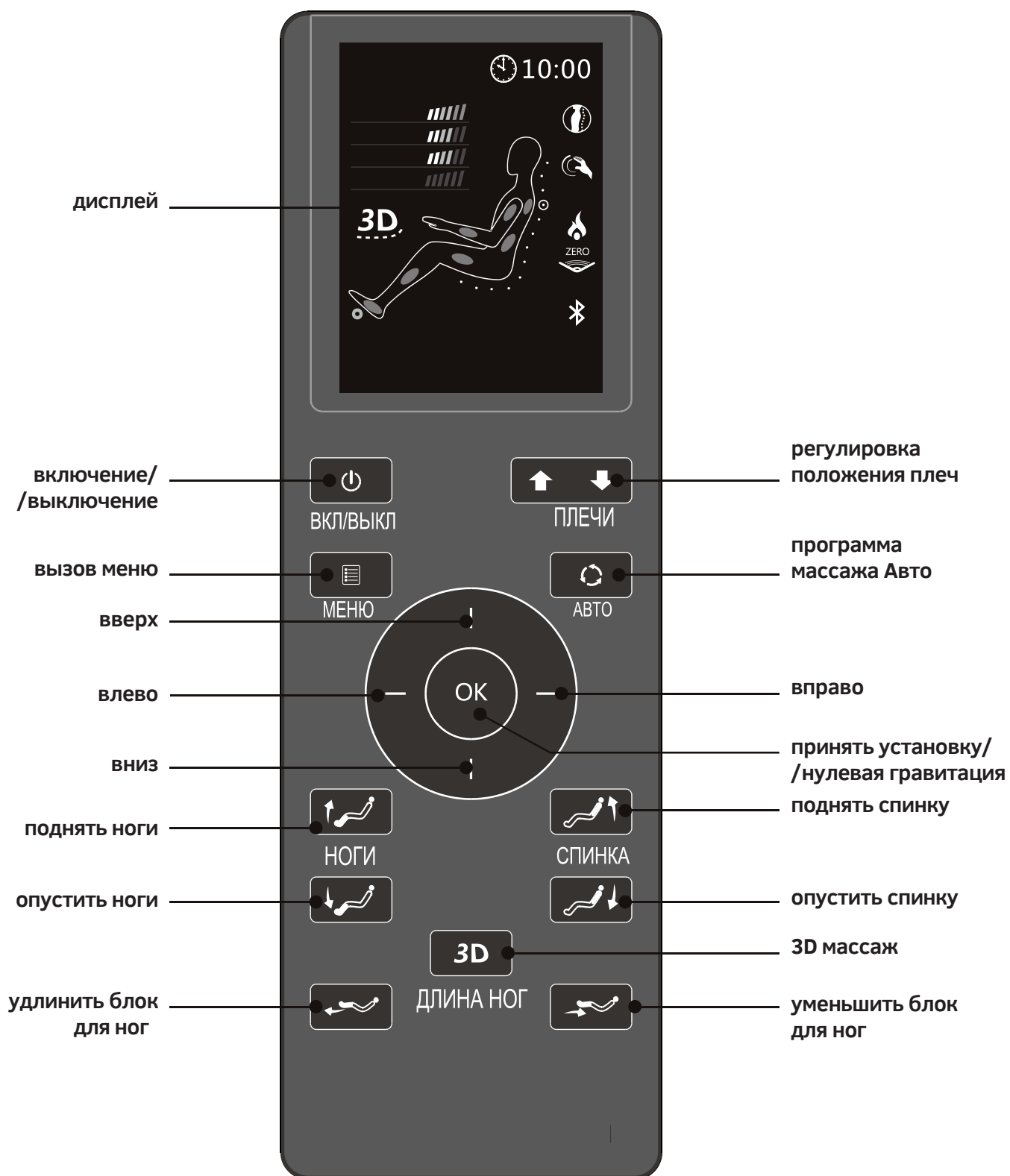

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Включение / выключение массажного кресла

Когда питание включено, нажмите эту кнопку, затем экран пульта загорится и вы сможете выбрать нужную вам функцию или программу. Нажмите на эту кнопку еще раз и массажное кресло отключится, массаж прекратится, экран погаснет.



Меню

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать в меню на дисплее автоматическую программу или ручные настройки, регулировку воздушной компрессии или 3D-массажа и т. д.



Регулировка позиции плеч

После сканирования тела в автоматических программах, нажимайте эту кнопку для подстройки положения роликов в области плеч.

В режиме ручного массажа вы можете установить ролики в необходимой вам области.



Автоматический режим управления

Когда массажное кресло включено и меню активно, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать одну из автоматических программ массажа.



Выбор пунктов меню и принятие установок

В ручном и автоматическом режиме, нажимайте кнопки «Вверх» / «Вниз» и «Влево» / «Вправо» для выбора необходимой программы массажа или изменения настроек. Для того, чтобы применить настройки, нажмите кнопку «ОК».

Во время массажа вы можете запустить режим «Нулевой гравитации» нажатием кнопки «ОК». Нажмите кнопки «Вверх» / «Вниз», чтобы отрегулировать скорость массажа. Нажмите «Влево» / «Вправо» для регулировки силы воздействия воздушной компрессии.



3D-массаж

Нажатием на эту кнопку вы можете отрегулировать силу воздействия 3D-массажа.



Поднять подставку для ног

Нажимайте эту кнопку, пока подставка для ног не поднимется на нужную высоту.



Опустить подставку для ног

Нажимайте эту кнопку, пока подставка для ног не опустится до нужного Вам уровня.



Поднять спинку

Нажимайте эту кнопку, пока спинка не поднимется на нужный уровень.



Опустить спинку

Нажимайте эту кнопку, пока спинка не опустится до нужного уровня.



Увеличить длину подставки для ног

Нажимайте эту кнопку, пока подставка для ног не выдвинется на нужную Вам длину.



Уменьшить длину подставки для ног

Нажимайте эту кнопку пока расстояние между подставкой для ног и креслом не уменьшится до нужной Вам длины.

I. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ



Выберите в главном меню пункт «Авто», нажмите «ОК» для выбора одной из программ.

Освежающий массаж: программа разработана специально, чтобы успокоить и расслабить напряженные мышцы после занятия спортом или другой физической активности. Данная программа усиливает приток крови к мышечным тканям, что помогает восстановить их после нагрузок.

Растяжка: эта программа имитирует элементы тайского массажа, такие как активное разминание и растяжка тела. Эффективно растягиваются мышцы икр, бедер, талии и другие. Это наилучшая программа для снятия мышечной усталости и увеличения физической силы.

Релаксация: программа для улучшения качества отдыха после обеда и сна. Интенсивность разминания плавно уменьшается в процессе массажа, что обеспечивает постепенное снятие усталости и расслабление.

Восстановление: эта программа отлично подходит для офисных работников, которые долгое время работают сидя за столом, совершают длительные поездки и в целом ведут малоподвижный образ жизни. Она помогает расслабить мышцы и восстановиться после рабочего дня.

Шея и плечи: программа направлена на уменьшение болевого синдрома в области шеи и плеч, 80% времени сеанса массаж проводится в этой зоне. Особая конструкция массажного механизма позволяет роликам идеально проработать все мышцы шейно-плечевой зоны. Вы получите эффективный массаж, который поможет снять усталость и напряжение.




Поясница: программа способствует облегчению боли в поясничном отделе позвоночника. 80% времени сеанса массажный механизм сосредоточен на обработке этой зоны. Ролики делают специфические массажные движения, которые снимают напряжение в мышцах и поддерживают здоровье поясничного отдела позвоночника.

По окончании выполнения автоматических программ кресло остается в разложенном состоянии, чтобы Вы могли отдохнуть после массажа и продлить его расслабляющий эффект. Для возврата кресла в исходное положение, нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.» 2 раза.

II. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕМ

Выберите в главном меню пункт «Ручные», нажмите «ОК» для выбора одной из программ и индивидуальной настройки массажа. Для перехода к выбору конкретного режима или параметра нажмите «Вправо» и передвигайтесь по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения выбора нажмите «ОК».

Изменение таких параметров, как ширина, скорость, зоны массажа доступно для программ ручного массажа.

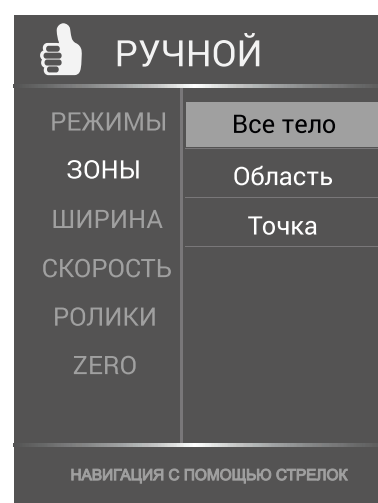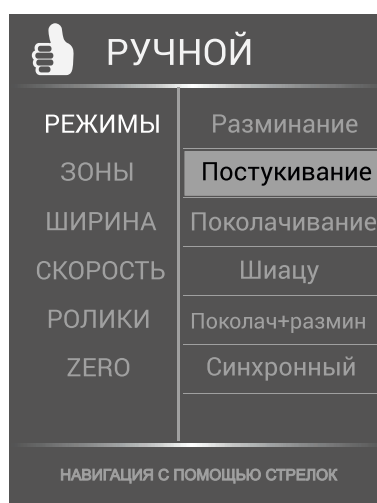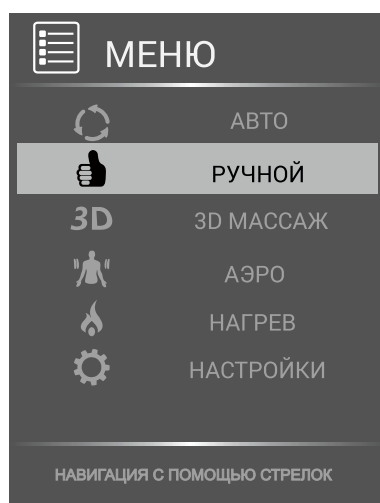

Режимы

В режиме синхронизации с музыкой возможно 2 варианта массажа:

- если музыка включена, используются разминающие, поколачивающие и надавливающие (массаж шиацу) движения; скорость поколачиваний изменяется в зависимости от ритма музыки;
- если музыка выключена, проводится массаж шиацу вместе с разминающими движениями


Вы можете прекратить выполнение любого режима массажа повторным нажатием на его название в меню.

Зоны

Нажав на этот пункт, вы сможете выбрать часть тела, которую хотите промассировать: Все тело, Область, Точка.


Для установки роликов в конкретной области или точке, используйте кнопки «Регулировка позиции плеч». Рекомендованное время массажа одной области — не более 5 мин.

II. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕМ

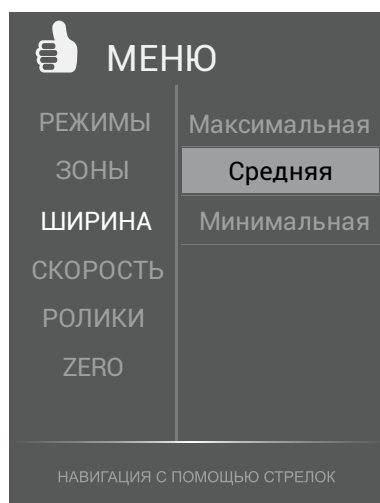


Ширина

Нажав на этот пункт, вы сможете выбрать расстояние между роликами в процессе массажа: максимальную, среднюю, минимальную.

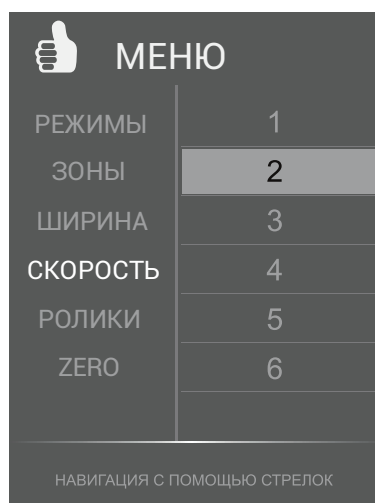


Скорость

Нажав на этот пункт, вы сможете отрегулировать скорость массажа. Доступно 6 скоростей движения роликов. Так же Вы можете регулировать скорость кнопками «Вверх» и «Вниз».

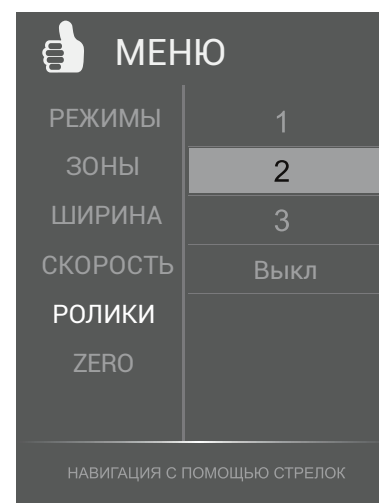

Ролики

Нажав на этот пункт, вы сможете установить скорость роликового массажа стоп или выключить его. Возможно проведение только роликового массажа стоп.

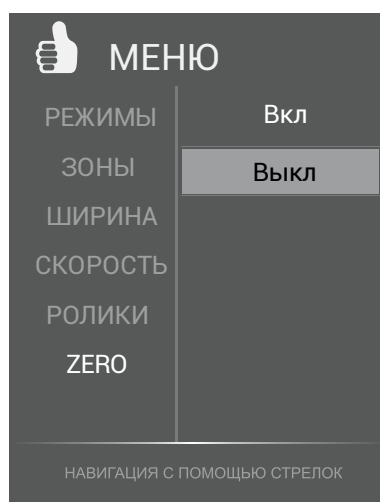

Zero Gravity

Нажав на этот пункт, вы сможете запустить или отключить функцию раскладки кресла в позицию «Нулевой гравитации» в автоматической программе или ручном режиме массажа. Это самая удобная, правильная и расслабляющая позиция, при которой усиливается массажный эффект. Ваше сердце и ноги находятся на одной прямой, при этом вы чувствуете себя, как космонавт в невесомости. В таком положении нагрузки на организм минимальные, ток крови более свободный. Такое положение идеально подходит для массажа и полностью расслабляет все ваше тело.

Так же вы можете включить или отключить режим Zero Gravity, нажав на пульте кнопку «ОК».

II. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕМ




3D-массаж

В данном пункте Вы можете выбрать как одну из программ, основанных на глубоком воздействии массажных роликов на тело, так и скорректировать силу их давления в процессе выполнения автоматической или ручной программы.

Выберите в главном меню пункт «3D-массаж», нажмите «ОК», затем Вы сможете выбрать технику 3D-массажа или настроить давление роликов. Для перехода нажмите «Вправо» и передвигайтесь по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения выбора нажмите «ОК».

По окончании выполнения программ 3D-массажа кресло остается в разложенном состоянии, чтобы Вы могли отдохнуть после массажа и продлить его расслабляющий эффект. Для возврата

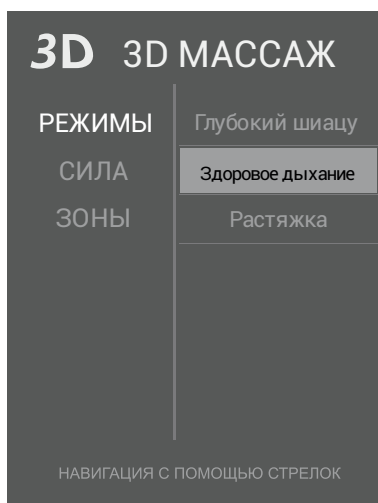

Режимы:

Глубокий шиацу: в процессе массажа изменяется ширина и степень давления роликов, воздействие более интенсивное по сравнению со стандартным режимом шиацу. Длительность сеанса 10 мин.


Здоровое дыхание: в течении 5 минут массажный механизм работает в ритме дыхания, помогая раскрыть грудную клетку и сделать вдох и выдох более глубокими.

Растяжка: программа интенсивной растяжки тела с помощью роликов,двигающихся в 3D-режиме. Длительность сеанса 5 мин. Для каждого из этих режимов возможно выбрать зону массажа.



Сила:

вы можете регулировать степень выдвигания роликов в процессе массажа, чтобы сделать массаж более глубоким. Доступно 5 уровней силы воздействия 3D-массажа. Так же Вы можете изменять силу давления роликов, нажав кнопку «3D» на пульте управления.

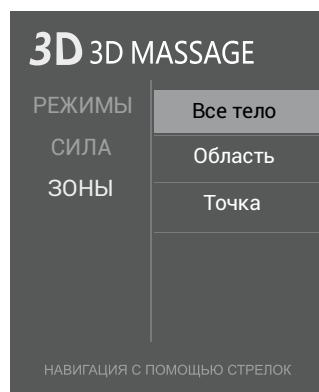

Зона:

в этом пункте вы сможете выбрать часть тела, которую хотите промассировать: Все тело, Область, Точка. Для установки роликов в конкретной области или точке, используйте кнопки «Регулировка позиции плеч».


II. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕМ



Воздушно-компрессионный массаж


Выберите в главном меню пункт «Аэро», нажмите «ОК» для настройки массажа. Для перехода к выбору значения параметра нажмите «Вправо» и передвигайтесь по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения выбора нажмите «ОК».

Вы можете делать воздушно-компрессионный массаж как отдельно от других техник, так и сочетать его со всеми доступными программами и режимами, выбирая степень компрессии и область воздействия. Так же возможно полностью отключить воздушно-компрессионный массаж.

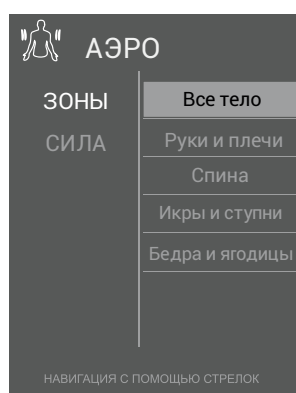


Зоны:

в этом пункте, вы сможете выбрать часть тела, которую хотите промассировать: Все тело, Руки и плечи, Спина, Икры и ступни, Бедра и ягодицы.

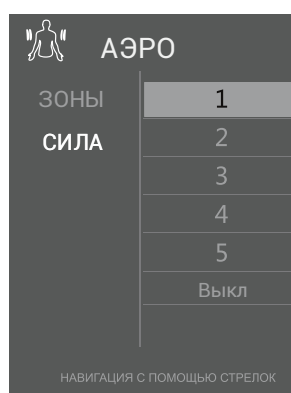

Сила:

вы можете регулировать уровень компрессии, чтобы сделать массаж более комфортным и полезным для себя. Доступно 5 уровней компрессии. Для остановки массажа выберите пункт «Выкл.». Также Вы можете регулировать интенсивность массажа, нажимая кнопки «Влево» и «Вправо»

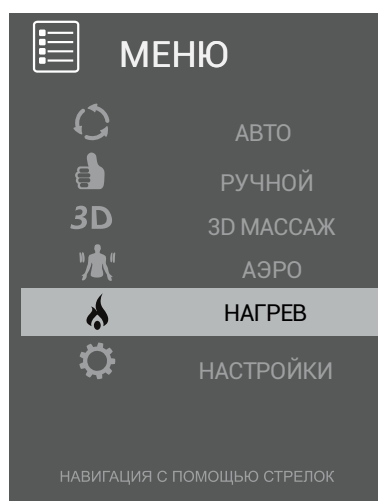

Нагрев


Нажмите на этот пункт и вы сможете включить или отключить инфракрасный прогрев поясницы, с помощью кнопок вверх и вниз. Нагрев возможно сочетать как с автоматическими, так и любыми ручными программами массажа, а так же включать отдельно. Нагрев автоматически выключается через 30 мин. работы.

III. НАСТРОЙКИ КРЕСЛА



Выберите в главном меню пункт «Настройки», нажмите «ОК» для перехода к списку настроек.

Для перехода к выбору значения параметра нажмите «Вправо» и передвигайтесь по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения выбора нажмите «ОК».

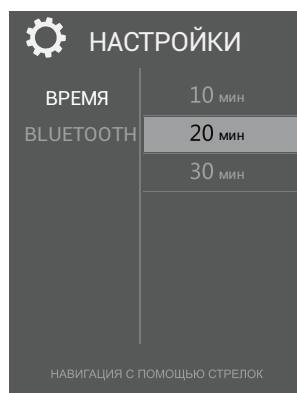


Время:

вы можете установить продолжительность массажа 10, 20 или 30 минут. Если продолжительность массажа не установлена, он автоматически выполняется 20 мин за исключением техник 3D-массажа. Общее рекомендованное время массажа в день — не более 30 мин. По истечении установленного времени кресло завершает массаж и выключается. Установленное время сохраняется после прекращения работы кресла.

Bluetooth:

вы можете включить Bluetooth для соединения со смартфоном или планшетом на операционной системе Android для прослушивания музыки. Запустите Bluetooth на своем телефоне, найдите устройство RT-8710 и запустите прослушивание музыки.

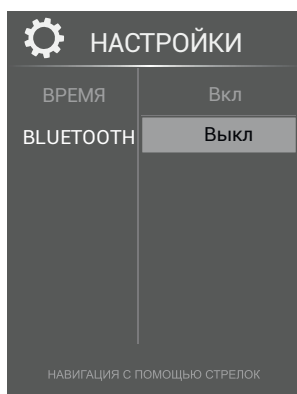

Экран выполнения программы

После выбора автоматической программы или настроек ручного массажа на дисплее появляется экран выполнения программы. На нем отображены место расположения роликов, способ массажа, оставшееся время выполнения программы, прогрев и т.д. Вся информация регулярно обновляется по мере изменения параметров. Для возврата на экран программы из меню, нажмите на пульте кнопку «Меню» 2 раза.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описываются самые распространенные проблемы, с которыми Вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если Вы не сможете устранить проблему, используя нижеследующую информацию, немедленно обращайтесь в сервисный центр компании дилера.

Если проблема не указывается в списке, попробуйте произвести следующее:

1. Выключите устройство и отсоедините от источника питания.
2. Подождите 60 минут.
3. Снова подсоедините устройство к рекомендуемому разъему сети и перезапустите.
4. Если проблема не устранилась, обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
|---------------------------------|---|--|
| Устройство не работает | Устройство не подсоединено к сети должным образом | Удостоверьтесь, что напряжение изделия соответствует напряжению местной сети и вновь подключите его. Удостоверьтесь, что розетка исправно работает |
| Устройство перестало работать | Устройство автоматически прекратило работу по сигналу таймера и переключилось в режим ожидания | Если Вы хотите запустить новый сеанс массажа, снова нажмите на кнопку ВКЛЮЧИТЬ |
| Устройство перестало работать | Вы непрерывно использовали устройство в течение 45 минут, в связи с этим активировалась защита от перегрева | Отсоедините устройство и оставьте его остывать в течение 60 минут перед следующим использованием |
| Устройство не работает | На устройство оказывается чрезмерная нагрузка | Устраните нагрузку и перезапустите устройство |
| Устройство сильно перегревается | Устройство чрезмерно эксплуатировалось. | Отсоедините устройство и дайте ему остыть перед следующим использованием. |
| Слышится шум при работе | Шум производится механическими компонентами устройства | Это нормальное явление и оно не означает поломку изделия |

УХОД И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА

При очистке устройства запрещено использование металлических губок, абразивных чистящих средств и агрессивных жидкостей, таких как бензин или ацетон. Не применяйте токсичных средств очистки для очищения кресла; тряпка должна быть влажной, но НЕ мокрой.

Нельзя погружать кресло в воду.

1. Выньте сетевой штепсель из розетки.
2. Очистите пульт управления и провода сухой тряпкой.
3. Нельзя использовать влажную тряпку или чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

1. После использования отсоедините устройство от источника питания.
2. Храните массажное кресло от попадания прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
3. Не кладите тяжелые предметы на изделие.

Если внешнее покрытие разорвано или механизм поврежден, прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр компании дилера.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по использованию массажного кресла, также обратитесь к дилеру.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Richter» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного кресла и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- ✓ небрежного хранения или транспортировки;
- ✓ нарушения правил эксплуатации;
- ✓ механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ✓ ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- ✓ повреждений или на рушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- ✓ использования изделия не по назначению;
- ✓ неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- ✓ блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;
- ✓ при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

Дата покупки _____

Наименование товара _____

Компания - продавец _____

Телефон _____

ФИО клиента _____

Адрес продавца _____

М. П. _____ подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____ / _____
(подпись) (расшифровка)

